

paseli mini

ACCESS Co.,LTD

電動カート SC-001

取扱説明書

Ver.1.02

- ご使用前によくお読みください。
- 大切に保管してください。

販売会社

製造元/株式会社アクセス

〒400-0048 山梨県甲府市貢川本町5-15




お問合せは

フリーダイヤル 0800-800-5224

平日9:00~18:00までにお問合せください。

ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
取り扱いを誤ると、事故や故障の原因となります。
この取扱説明書をよくお読みいただき、
いつまでも安全・快適にご使用ください。

この取扱説明書の中で使用されている記号は、次のようになっています。

 警 告	取り扱いを誤った場合、死亡または重大な障害を生じる可能性が想定される内容を示しています。
 注 意	取り扱いを誤った場合、障害を負う可能性がある内容、または物的損害の発生が予想される内容を示しています。
 アドバイス	ご使用に際して守っていただきたいこと、および知っておくと便利なことを示しています。

- この取扱説明書は、よくお読みになった後も大切に保管してください。
- 当製品をおゆずりになる場合、次に所有される方のためにこの取扱説明書をお渡しください。
- オプションパーツなど、取り付けられた装備品などについては、装備品に添付されている取扱説明書をお読みください。
- 仕様などの変更により、この取扱説明書の内容やイラストと、実際の車両が一致しない場合があります。あらかじめご了承ください。

・運転の前に

注意事項を守り、安全運転を心がけてください。

○当社電動カートは歩行者です。



注意

- ・当社電動カートは、道路交通法では“歩行者”として扱われます。運転免許は必要ありません。歩行者としての交通ルールやマナーを守ってください。
- ・歩道や横断歩道を走行してください。歩道のないところは、右側通行をしてください。
- ・横断歩道では、一時停止してください。
- ・歩道が途切れた所や、歩道を通行できないためやむを得ず車道に出るときは、車や段差に十分注意してください。
- ・斜め横断はしないでください。
- ・混雑している場所や、人通りの多い場所での走行は避けるようにしてください。
- ・飲酒時や過労時は、運転しないでください。
- ・夜間運転はできる限り避けてください。
- ・歩行者用標識や信号を守ってください。

・ 運転の前に

○まずは運転に慣れましょう。



アドバイス

- ・ 運転に慣れるまでは、公園などの安全な広い場所で練習し、発進、停止、旋回などの感覚をつかんでください。
- ・ 慣れるまでは、最高速度調節スイッチを「低速」状態で練習してください。
- ・ 公園など公共の場で練習する場合には、その場所のルールを守り、周りの人や物にぶつからないように注意してください。

○はじめて道路に出る時は。



注意

- ・ 十分な練習後、はじめて道路に出るときは、ご家族など介助者と一緒に安全を確かめながら走行してください。

必読 必ずお読み下さい

・運転の前に

○当車輛は1人乗りです。



警告

- ・電動カートは1人乗り専用車輛です。2人乗り（子供も含む）はしないでください。
- ・遊具等として使用しないでください。

○荷物のけん引はしないでください。



注意

- ・荷物のけん引はできません。予期せぬ事故、故障、破損の原因となります。
- ・最大乗車重量は、運転者の体重と積載物を合わせて110 kgです。この重量を超えて使用しないでください。

必読 必ずお読み下さい

・運転の前に

○日常点検・定期点検をしっかりしましょう。



注意

- ・走行する前には、毎回必ず日常点検を行いましょ。走行中の予期せぬトラブルを回避する為の大切な作業です。

(P21「日常点検マニュアル」参照)

- ・定期的にモーター駆動部やバッテリー一部など日常点検では目の届きにくい部分もしっかり点検・整備を行いましょ。

・運転時の注意

○携帯電話の使用について。



注意

- ・走行中は、携帯電話などを使用しないでください。使用する時は、安全な場所に停止し、車輻本体電源スイッチを切ってください。

・運転時の注意

○正しい姿勢・服装で運転しましょう。



注意

- ・運転するときは、シートに深く腰掛け、座った状態で操作を行ってください。立ち上がったたり、体が車体からはみ出した状態での走行など、不安定な体勢での運転は、転倒など事故を引き起こす原因となります。
- ・運転する時は、アームレストは常に下げた状態にしておいてください。カーブ時や段差走行時に車体から転落する恐れがあります。
- ・ハンドル操作の妨げになる姿勢・服装での運転はしないでください。危険回避を要する場合、操作の妨げになる場合があります。
- ・衣服や積載物などが車輪や周囲の障害物などに引っかからないように注意してください。巻き込まれたりして怪我をしたり、事故を引き起こす原因となります。

・ 運転時の注意

○次のような場所での運転はやめましょう。



注意

- ・ 次のような場所や状況では、転倒や故障の原因となりますので、走行を避けてください。
〔砂利道・ぬかるんだ道・雪道・凍結した道・水たまり・夜間・降雨・降雪・濃霧・強風時・凸凹の激しい道など〕
- ・ 次のような場所や状況では、接触や衝突の恐れがありますので、走行を避けるか、介助者を同行し、安全確認や脱輪予防をしてください。
〔混雑している場所・交通量の多い道路・横断歩道・狭い道・防護柵のない側溝や路肩付近・踏切・電車や乗り物に乗るときなど〕



警告

- ・ 脱輪などで動けなくなった場合には、アクセル操作による脱出は行なわず周囲にいる人の助けを借りて脱出してください。
無理にアクセル操作をすると、事故、故障の原因になります。

・ 運転時の注意

○踏切の横断について



注意

- ・踏切など、大きな溝のある場所は、なるべく走行しないようにしてください
- ・走行する場合は、介助者の手を借りるようにしてください。



警告

- ・万が一、踏切内で動かなくなったときには、近くに人がいる場合には、その人に協力していただき、早急に車輛の移動および避難をしてください。

※踏切内から脱出できないような最悪の場合には、踏切の非常ボタンを押してください。

○バッテリーについて



注意

- ・バッテリーの周囲温度が -10°C 以下、または 40°C 以上で走行や保管をしないでください。また、バッテリーの周囲温度が 0°C 以上から 30°C 以下で充電してください。これらの温度範囲外では、凍結や過熱をおこし、破損や変形、早期劣化の原因となります。

・使用上の注意

○修理・改造について



注意

- ・修理や改造が必要な場合は、購入店または代理店にご相談ください。不適切な改造は安全性が低下して、事故や故障の原因となります。また、改造した場合は保証が得られない場合があります。

○純正部品について

- ・交換、修理などの際の部品交換時は、メーカー純正部品を使用してください。



アドバイス

- ・部品の購入、交換は購入店または販売代理店にご相談ください。

○使用者最大体重について




注意

- ・使用者の最大乗車重量は、運転者の体重と積載物を合わせて110 kgです。この重量を超えて使用すると、故障や破損の原因となります。この場合には、保証の対象外となります。

取り扱い方法

・各部の名称

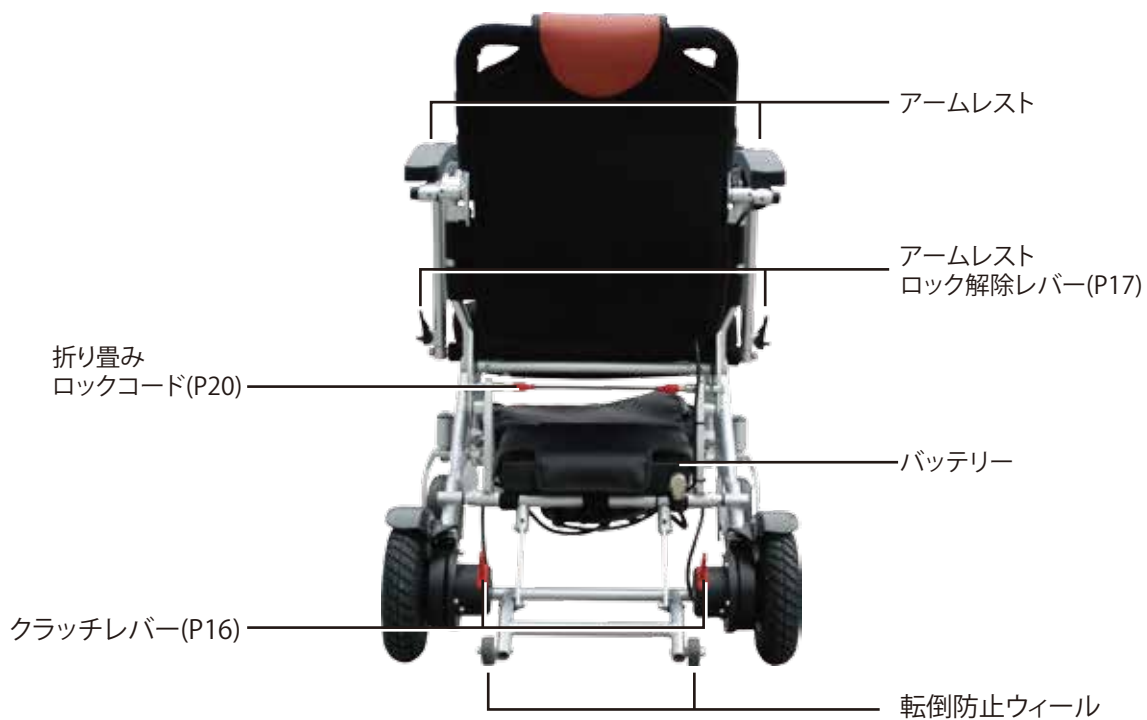

取り扱い方法

・各部の名称

■操作部




取り扱い方法

・各種レバー・スイッチの使い方

■電源スイッチ・ジョイスティック



- 電源スイッチを押すと電源が“ON”の状態になり、走行可能になります。駐車時、降車時には再びスイッチを押し、電源を“OFF”の状態にします。

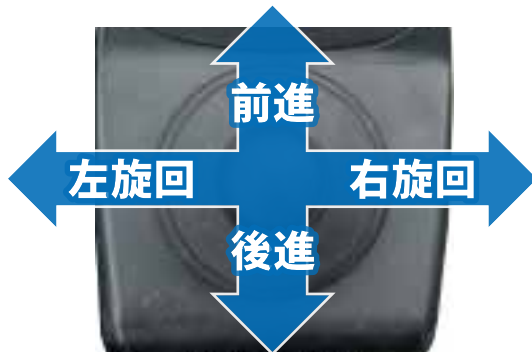

- スティックを前後に倒すと前進・後進します。
- スティックを左右に倒すと旋回します。
- スティックを倒す大きさによって、速度を調節できます。



注意

- ・前進／後進レバーを戻した状態では電磁ブレーキが作動しているため、車輻は停止します。

・バッテリー残量メーターの見方



バッテリー残量メーター



…満充電状態です。



…バッテリー残量50%前後です。



…バッテリー残量がわずかです。
直ちに充電してください。



アドバイス

- ・バッテリー残量メーターはあくまでも目安です。ご使用後は走行距離にかかわらず毎回満充電状態にしておきましょう。
- ・バッテリーの減りが早くなってきましたら、バッテリー交換の時期です。購入店あるいはメーカーにお問合せください。

・各種レバー・スイッチの使い方

■最高速度調整スイッチ、ホーンボタン



最高速度調整スイッチ

- 最高速度調整スイッチ(+-)を押すことにより、最高速度を任意に調整することができます。



アドバイス

- ・安全のため、通常利用する際は、最高速度の目盛りを低速あるいは中速に合わせておきましょう。



ホーンボタン

- ホーンボタンを押している間、警笛が鳴ります。ボタンを離すと警笛が鳴り止みます。




注意

- ・ホーンボタンはむやみに鳴らさないようにしましょう。危険を感じた場合には安全な場所に停車し、危険を避けましょう。

取り扱い方法

・各種レバー・スイッチの使い方

■クラッチレバー

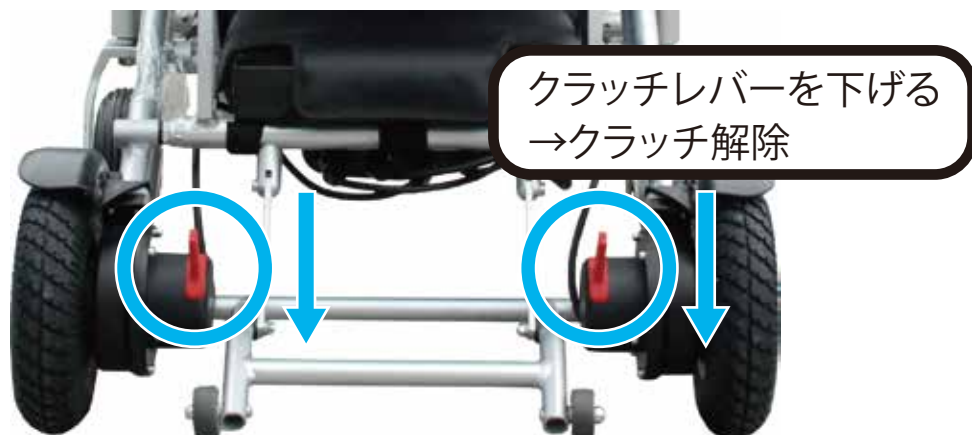

- クラッチレバー操作により、クラッチを解除すると、車輦を自由に手で押すことができます。



注意

- ・バッテリー切れやトラブル発生時など、周囲の人に力を借りて車輦を移動する場合以外は使用しないでください。
- ・坂道などでクラッチ解除操作を行うと、大変危険です。絶対にクラッチ解除操作を行わないでください。

・各種レバー・スイッチの使い方

■アームレストロック解除レバー



解除レバーを外に倒しながら
アームレストを引き上げる



- アームレストロック解除レバーを外側に倒しながら、アームレストを引き上げられます。
- 戻すときは、アームレストをそのまま下に押し込みます。




注意

- ・運転する時は、アームレストは常に下げた状態にしておいてください。カーブ時や段差走行時に車体から転落する恐れがあります。

・ 充電方法

■ 充電の開始

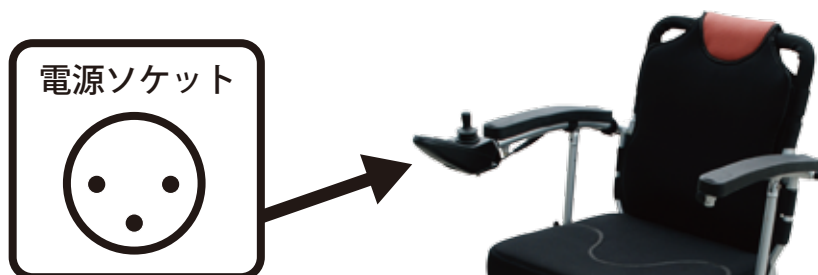

① 電源ソケットへ挿し込む



■ 充電が完了したら



・充電時の注意



警告

- ・感電の恐れがあります。電源プラグや手が濡れた状態で充電しないでください。
- ・電源プラグや手が濡れているときは、乾かしてから充電操作を行ってください。
- ・引火爆発の恐れがあります。充電中バッテリーに火気を近づけないでください。
- ・直射日光を避け、風通しのよい場所で充電してください。
- ・雨、露の影響を受けない湿気の少ない場所で充電してください。
- ・雨よけシートなどをかけたまま充電しないでください。



注意

- ・必ず専用の充電器を使用してください。
- ・専用の充電器以外の充電器を使用しますと、充電ができなかったり、バッテリーを傷める恐れがあります。
- ・充電器の分解・改造はしないでください。
- ・周囲温度が 0℃～30℃で充電してください。この温度範囲外では、凍結や加熱をおこし、破損や変形、早期劣化の原因となります。

・折り畳み方法




注意

- ・折り畳み操作は、必ず人が降りた状態で行ってください。

取り扱い方法

・展開方法

1

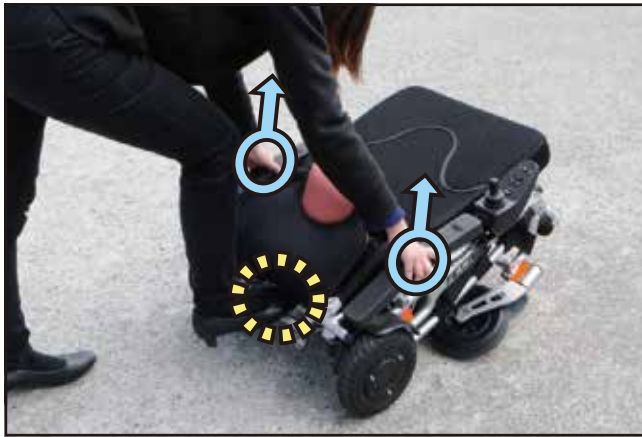

後部の転倒防止ウィール部分を踏みながら、アームレストを引き上げます。

2



アームレストを上まで引き上げます。折り畳みロックが“カチッ”とロックします。

3



背もたれ上部を起こし、左右の背もたれロックをかけます。

・ 日常点検マニュアル

○走行前に必ず日常点検を行ってください。故障や以上が見つかった場合は、ご使用にならず、購入店あるいはメーカーへお問合せください。

点検箇所	点検内容
操作パネル	正常に作動しますか？
ジョイスティック	ゆるみ・ガタはありませんか？ 前後左右へスムーズに動きますか？
最高速度調節スイッチ	正常に作動しますか？
クラッチ操作	正常に作動しますか？
バッテリー残量表示	正常に作動しますか？
ホーン	正常に鳴りますか？
タイヤ	亀裂、損傷はありませんか？
充電器	正常に機能しますか？
その他	異音はしませんか？

サービスデータ

・ 諸元表

型式	SC-001
全長/全幅/全高	870mm/560mm/910mm
最低地上高	45mm
シートサイズ	410*420mm
パッキングサイズ	770*410mm
折畳長/折畳幅/折畳高	560/650/300mm
車両重量	18.8kg
乗車重量	110kg (積載物含む)
最高速度	前進:~6km/h 後進:~2km/h
登坂力	10°
一充電走行距離	8km
定格出力	200W*2モーター
バッテリー	リチウムバッテリー
電圧/容量	24V/10Ah
制御方式	アクセルレバーによる無段階制御方式
カラー	ブラック

— 保証書 —

No. _____

品番		車体番号	
----	--	------	--

ご購入日 年 月 日

保証期間 モーター・コントローラー：3年
 ※モーター付属のブラシは消耗品の為、保証対象外です。
 その他機能部品：1年
 バッテリー：6ヶ月

※消耗品、外装品については保証対象外です。

お買い上げいただきありがとうございます。
保証期間内に通常のお取り扱いで万一故障が生じた場合は、
無償にて対応いたします。
(取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。)

お名前 _____

ご住所 〒 _____

お電話番号 _____

○本保証書は再発行いたしかねますので、大切に保管してください。

○本保証書は日本国内でのみ有効です。

販売会社

製造元

株式会社 アクセス

山梨県甲府市貢川本町5-15
TEL:055-221-5555 FAX:055-221-0002
HP: <http://www.access-trd.co.jp>
MAIL: toiawase@access-trd.co.jp

